


Näin aloitat Firstbeat Lifen yksilölle

1

KIRJAUDU FIRSTBEAT LIFE ADMINIINIIN.

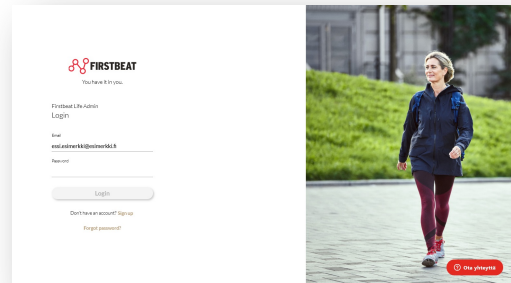


Kirjaudu Firstbeat Life Admin -järjestelmään osoitteessa <https://admin.firstbeatlife.com/provider//>

Käyttäjätunnuksen ja salasanan olet saanut osoitteesta: service@firstbeat.com

2


ALOITA VALITSEMALLA "ALOITA YKSILÖLLE".

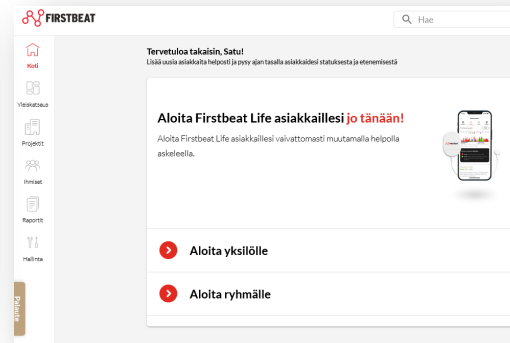

Aloita Koti-näkymässä valitsemalla "Aloita yksilölle". Tämän jälkeen kirjoita asiakkaasi sähköpostiosoite avautuvaan ikkunaan ja paina "Seuraava".

3


VALITSE TILAUKSEN KESTO.

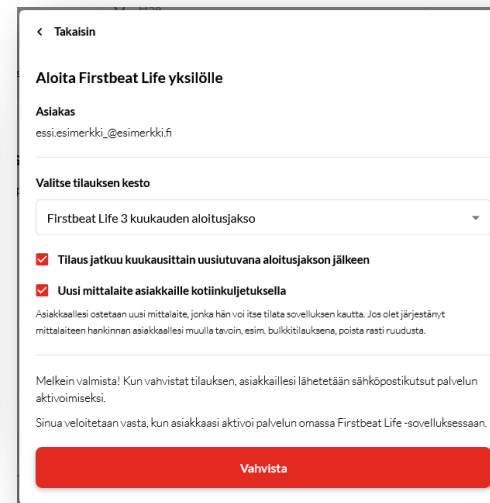

Valitse tilauksen kesto ja jatketaanko tilausta kuukausittain uusiutuvana aloitusjakson jälkeen. Valitse tilaanko uusi mittalaite asiakkaallesi kotiinkuljetuksella. Paina lopuksi "Vahvista"

4

ASIAKKAASI SAA KUTSUN SÄHKÖPOSTIINSA.

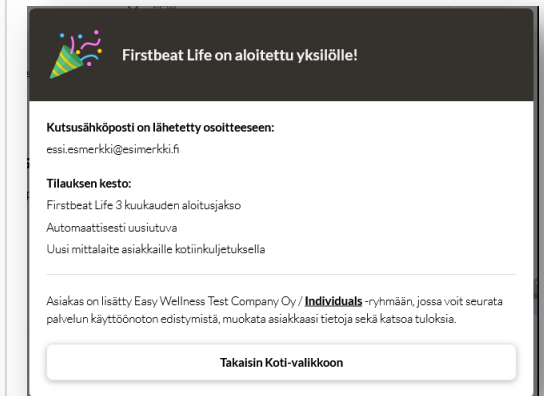


Kaikki on nyt sinun osaltasi valmista!

Asiakkaasi saa kutsuviestin ja ohjeet sähköpostitse. Asiakkaasi aktivoi palvelun omassa sovelluksessaan, minkä jälkeen hän voi aloittaa mittaukset itsenäisesti.

Näin aloitat Firstbeat Lifen ryhmälle

1

KIRJAUDU FIRSTBEAT LIFE ADMINIINIIN.

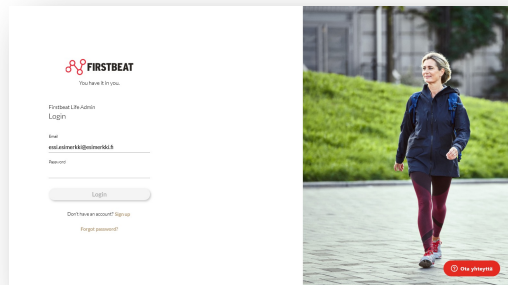


Kirjaudu Firstbeat Life Admin -järjestelmään osoitteessa <https://admin.firstbeatlife.com/provider/>

Käyttäjätunnuksen ja salasanan olet saanut osoitteesta: service@firstbeat.com

2


ALOITA VALITSEMALLA "ALOITA RYHMÄLLE".

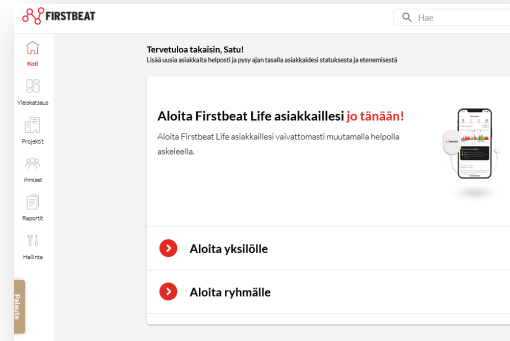

Aloita Koti-näkymässä valitsemalla "Aloita ryhmälle". Tämän jälkeen kirjoita asiakkaidesi sähköpostiosoitteet avautuvaan ikkunaan ja paina "Seuraava".

3


VALITSE TILAUKSEN KESTO.

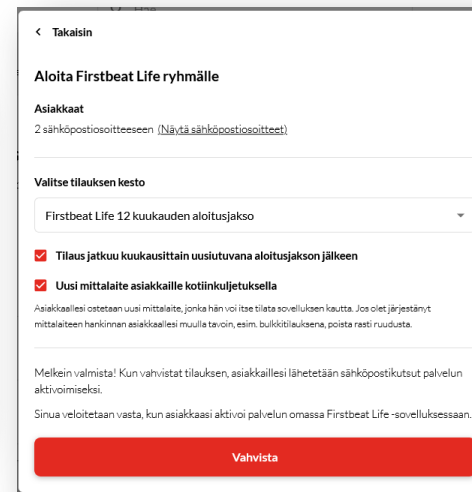

Valitse tilauksen kesto ja jatketaanko tilausta kuukausittain uusiutuvana aloitusjakson jälkeen. Valitse tilataanko asiakkaillesi uudet mittalaitteet kotiinkuljetuksella. Paina lopuksi "Vahvista".

4

ASIAKKAASI SAAVAT KUTSUT SÄHKÖPOSTEIIHNSA.

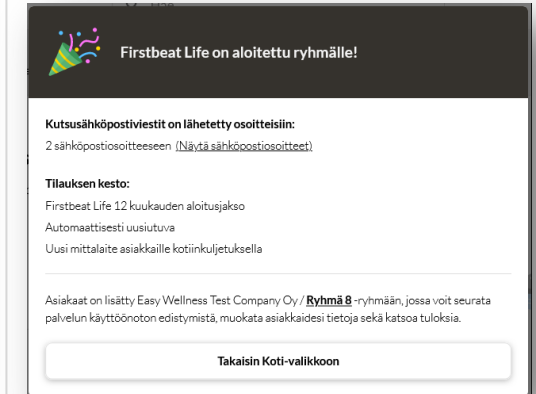

Kaikki on nyt sinun osaltasi valmista!

Asiakkaasi saavat kutsuviestit ja ohjeet sähköpostitse. Asiakkaasi aktivoivat palvelun omassa sovelluksessaan, minkä jälkeen he voivat aloittaa mittaukset itsenäisesti.